

Induktiosilmukan käyttöohje

Kyseessä on herkkä laite, joten käsittele ja kuljeta hellästi.



1. Lähetin
2. Silmukka
3. Äänen testauslaite
4. Langaton puhemikrofoni
5. Langaton korvantausmikrofoni
6. Mikrofonien laturi + johto
7. Silmukan lisäjohto
8. Laitteen kuljetussalkku
9. Laitteen virtajohto

Laita mikit latautumaan!

Ota silmukkarulla ja vie se tilan takaosaan lattialle. Vedä siitä ulos kaksi johtoa niin, että ne kiertävä kuulijat molemmin puolin. Kuulijat jäävät ringin sisälle. Käytä tarvittaessa lisäjohtoa.

Salkku sijoitetaan tilan etuosaan. Kumpikin silmukan johto kytketään salkun etuosaan.

Salkun virtajohto seinään ja virta päälle.

Testerillä voit tarkistaa, onko kentän kuuluvuus sopiva. Keltaisen valon palaessa melko tasaisesti ja vihreän vähän vilkahtaen kuuluvuus on hyvä.

Käsimikrofoni ottaa puheäänien päältäpäin, joten mikki puhujalla suun alla, leuan kohdalla.

Puhuja voi olla joko kehän sisällä tai ulkona. Johdon päällä ääni katoaa, eikä välity kuulijan vastaanottimeen.

Huom! Testaa mikkien akut ennen käyttöä. Tarvittaessa lataa niitä.

Käytön jälkeen virrat suljetaan ja kaikki osat pakataan salkkuun siististi, jotta arvokas laite säilyy ehjänä ja käyttökuntoisena vielä pitkään.