

## Hörslingans brusanvisning

Detta är en känslig anordning som ska hanteras och transporteras varsamt!



1. sändare
2. slinga
3. Testenhet för ljud
4. Trådlös talmikrofon
5. Trådlös mikrofon bakom örat
6. Laddare och sladd för mikrofonerna
7. Extra ledning för slingan
8. Anordningens transportfölj
9. Anordningens stömsladd

Sätt mikrofonerna att laddas!

Ta slingrullen och ställ den på golvet i bakre delen av utrymmet. Dra ut två ledningar ur rullen så att de går runt åhörarna på bägge sidor. Åhörarna blir inom ringen. Använd den extra sladden vid behov.

Portföljen placeras i främre delen av utrymmet. Vardera slingledning kopplas till portföljens framsida.

Koppla portföljens strömsladd i väggen och sätt på strömmen.

Du kan kontrollera hörbarheten i täckningsområdet med hjälp av testenheten. Hörbarheten är bra då det gula ljuset lyser rätt så jämnt och det gröna ljuset glimtar till ibland.

Handmikrofonen tar upp tal ovanifrån, så talaren ska hålla mikrofonen under sin mun, vid höjd av hakan.

Talaren kan vara innanför eller utanför ringen. Ljudet försvinner och förmedlas inte till åhörarnas mottagare om man står på ledningen.

Obs! Kontrollera mikrofonernas batterier före användning och ladda dem vid behov.

Efter användning kopplas strömmen av och alla delar packas snyggt in i portföljen, så att den värdefulla anordningen hålls hel och går att använda länge än.